无论您的病人需要缓慢持续的输液(0.1ml/hr)还是快速大剂量的注射胶质药物,佳士比C6系列注射泵都会满足您的需求。您会感受到产品快速,简便的操作过程。

如果您还没有使用过佳士比注射泵,您也可能 听说过其美誉-简单方便的操作,可靠的运行 表现和高性价比。佳士比系列产品在全世界有 着超过30年的历史,深受医护人员的信任,广 泛使用在手术室,重症监护室和普通内科。

即使在您购买佳士比输液产品多年以后, 史密斯医疗依然会全面支持, 无论是安装还是替换产品。史密斯医疗的客服中心和维修团队秉承国际服务的标准, 以符合您对我们的期望。



# 操作简便

可靠耐用

四步简单快速的操作程序,为临床 人员节省出更多的时间来陪护病人。 泵体上的注射器装载指示图随时随 地为临床操作提供了清晰明了的指 导。按"总量"键随时可以显示已 输注的总量,为临床护理提供便利。

### 阻塞后压力自动释放功能

通过释放阻塞后管路中积聚的压力,来避免对病人输注不必要的剂量。

### 输液管固定夹

减少因意外拉动延长管而造成的管路脱落,减少漏液风险。

### 声光报警

提高医护人员的警报意识,以其做出及时的应对措施。

#### 运行中两步关机操作

有效防止运行中注射泵的意外关机。

### 保持静脉畅通功能

在护士换药的时候,帮助保持静脉畅通。

### 交流电源加内部充电电池

在交流电源失效的情况下,有效保证注射泵持续地 工作。

### 体重模式(仅佳士比C6T注射泵)

体重模式为转换质量单位到输注速率提供了便利,适 合儿科和麻醉科使用。

### smiths medical

bringing technology to life

佳士比™C6注射泵	
产品货号	注册证号
21B1T100	浙食药监械(准)字2014第2540605号

佳士比™C6T注射泵	
产品货号	注册证号
22B1T100	浙食药监械(准)字2014第2540595号

### 规格

重量	2.1kg ( 大约重量,包含固定夹 )				
尺寸	307mm x 133mm x 128mm(不含固定夹)				
交流电源	220V, 50-60Hz				
电池类型	可充电的12V镍氢电池				
电池寿命	5ml/hr可持续4小时				
KVO速率	0.5ml/hr (连续模式,非VTBI模式)				
速率范围	0.1ml/hr到1200ml/hr取决于注射器大小				
VTBI	0.1ml 到9999ml				
阻塞压力等级	19				
低(L)	300 mmHg ± 100 mmHg 40.0 kPa 10.3 kPa				
中(C)	500 mmHg ± 100 mmHg 66.7 kl a 13.3 kPa				
高(H)	800 mmHg ± 200 mmHg 106.7 kPa ± 26.7 kPa				
输液精度	± 2%				

佳士比""(	26T注射器体重模式规格	Ky star
质量单位	mcg/kg/min 或 mg/kg/hr	<b>发</b>
体重	0.1kg 到 300kg	The state of the s
药物质量	0.1mg 到 999.9mg	
溶液容量	0.1ml 到 999.9ml	

### 注射泵兼容的注射器品牌

佳士比™C6注射泵支持诸多注射器品牌和尺寸,包括了国内几大主要生 产商和精选厂商。注射泵可以自动感应注射器尺寸20ml, 30ml, 50ml。

### 支持的注射器品牌和尺寸

编码	注射器品牌	20 mL	30 mL	50 mL	
01	浙江玉升	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
02	龙德	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
03	威高洁瑞	$\checkmark$	$\checkmark$	$\vee$	
05	新华	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
05	哈娜好	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
06	苏云	$\checkmark$	$\vee$	$\vee$	
07	東德莱	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
08	双鸽	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
169,	灵洋	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
46	B-D	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
11	JMS			$\checkmark$	
12	龙心	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	
13	洪达	$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	

GRASEBY



## 佳士比™C6和C6T注射泵



专业的输注伴侣



### 佳士比 C6 单道微量注射泵性能参数

产品型号: 单道微量注射泵(佳士比 C6)

1 注射器规格 20ml、30ml、50ml

2 注射速率 50ml: 0.1ml/h---1200ml/h (0.1-999ml 每级 0.1ml/h, 1000ml 以上每级 1ml/h)

30ml: 0.1ml/h---600ml/h (每级 0.1ml/h) 20ml: 0.1ml/h---399.9ml/h (每级 0.1ml/h)

3 快速速率 1200ml/h (50ml 注射器)

600ml/h (30ml 注射器) 399.9ml/h (20ml 注射器)

4 累计容量 0.1—9999ml(0.1-999,以 0.1ml/h 递增;1000ml 以上,以 1ml/h 递增)

5 限制量 0—9999ml

6 精度 ≤±2% (泵本身机械精度≤±1%)

7 电源 AC220V±22V 50HZ±1HZ

DC12V 充电 16 小时后以 5ml/h 可持续工作 4 小时

8 环境条件 温度-5—40℃ 相对湿度 20%---90%

★9 报警 残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、

电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

10 报警优先级

11 自动识别注射器规格

★12 可使用一次性注射器(包含 13 种不同品牌),并且可为客户量身校准其他品牌

★13 阻塞后针筒内压力自动释放

★14 可记录 500 条以上(含 500 条)历史纪录)

15 重量 2.1kg 含固定夹

16 三档阻塞压力等级选择 低(L) 300mmHg+/- 100mmHg

中(C) 500mmHg+/- 100mmHg

高(H) 800mmHg+/- 200mmHg

17 RS232 电脑接口

★18 限制量设定:设定使用限制量、当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

19 KVO 速率

20 安全类型: I 类 CF 型

21 快速推进键保险

22 注射过程中快速推注

★23 IPX 等级: IP×4 (防溅

★24 符合 YY0709 国家标准

★25 符合 YY0505 国家标准

