

无论您的病人需要缓慢持续的输液 (0.1ml/hr) 还是快速大剂量的注射胶质药物，佳士比™F6 双道微量注射泵都会满足您的需求。您会感受到产品快速，简便的操作过程。

如果您还没有使用过佳士比注射泵，您也许听说过其美誉—简单方便的操作，可靠耐用的运行表现和高性价比。佳士比系列产品在全世界有着超过30年的历史，深受医护人员的信任，广泛使用在手术室，重症监护室和各大科室。

即使在您购买佳士比输液产品多年以后，史密斯医疗依然会全面支持，无论是维修还是保养产品。史密斯医疗的客服中心和维修团队秉承国际服务的标准，全心为您服务！

佳士比™ F6双道微量注射泵



操作简便 可靠耐用

▶ 四步简单快速的操作程序，为临床人员节省出更多的时间来陪护病人。

符合最新国家安全法规

YY0709 升级报警系统 使用更安全。

YY0505升级电磁兼容性 避免与其他医疗设备的电磁波产生互相干扰。

阻塞后压力自动释放功能

触发管路阻塞报警后，马达自动反转，释放管路中积聚压力，避免病人接受不必要的剂量。

一根电源线

双通道使用一根电源线，有效减少对电源插座的需求，和电缆线缠绕的问题。

运行中防止意外关机

运行中需要两步操作才能关机，避免意外关机。

保持静脉畅通功能

在护士换药的时候，帮助保持静脉畅通。

自动识别10ml、20ml、30ml和50ml注射器 方便临床操作。

兼容的注射器品牌

出厂已校准13个常用品牌，可以为客户量身校准其他品牌。

佳士比™ F6双道微量注射泵

产品货号	注册证号
14B1T100	浙械注准20142540288

规格

重量	3.2kg (大约重量, 不包含固定夹)		
尺寸	349mm x 185mm x 128mm (不含固定夹)		
交流电源	220V, 50Hz, 21VA		
电池类型	可充电的12V镍氢电池		
电池续航	5ml/hr 连续运行不低于3小时		
KVO速率	0.5ml/hr		
速率范围	0.1ml/hr 到 1200ml/hr 取决于注射器大小		
VTBI	0.1ml 到 9999ml		
防水等级	IPX4		
阻塞压力等级			
低 (L)	300 mmHg ± 100 mmHg	40.7 kPa ± 13.3 kPa	
中 (C)	500 mmHg ± 100 mmHg	66.7 kPa ± 13.3 kPa	
高 (H)	800 mmHg ± 200 mmHg	106.7 kPa ± 26.7 kPa	
输液精度	+/-2%		

佳士比™ C6T注射器体重模式规格

质量单位	mcg/kg/min 或 mg/kg/hr		
体重	0.1kg 到 300kg		
药物质量	0.1mg 到 999.9mg		
溶液容量	0.1ml 到 999.9ml		

佳士比™ C6微量注射泵

产品货号	注册证号
21B1T100	浙食药监械(准)字2014第2540605号

佳士比™ C6T体重模式微量注射泵

产品货号	注册证号
22B1T100	浙食药监械(准)字2014第2540595号

注射泵兼容的注射器品牌

佳士比™ F6出厂已校准13个常用注射泵品牌，并且可以为客户量身校准其他品牌。

出厂已校准的13个常用品牌

编码	注射器品牌	10 mL	20 mL	30 mL	50 mL
01	玉升	✓	✓	✓	✓
02	龙德	✓	✓	✓	✓
03	威高	✓	✓	✓	✓
04	新华	✓	✓	✓	✓
05	哈斯好	✓	✓	✓	✓
06	苏云	✓	✓	✓	✓
07	康德莱	✓	✓	✓	✓
08	双鸽	✓	✓	✓	✓
09	灵洋	✓	✓	✓	✓
10	B-D	✓	✓	✓	✓
11	JMS	✓	✓	✓	✓
12	龙心	✓	✓	✓	✓
13	洪达	✓	✓		✓

佳士比™ F6双道微量注射泵



GRASEBY™

北京办公室

北京市朝阳区东三环中路20号 乐成中心A座29层 100022
电话: +86 (010) 5632 0688

杭州办事处

浙江省杭州市下城区庆春路87号中都大厦1101室 310013
电话: +86 (0671) 8721 7300

售后服务

客服邮箱: smz.help@smiths-medical.com
客服热线: 400 091 2620